

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE LECHE

RECOMENDACIONES:

1. Prepare con antelación todo el material que necesita: guantes, algodón alcohol, tubos estériles, rotuladores, productos para limpiar y desinfectar los pezones

2. Siempre tomar una muestra antes de administrar un tratamiento con antibióticos.

Si la muestra no se manda a analizar inmediatamente, congelarla.

Esta muestra aporta información muy valiosa para un tratamiento posterior. Siempre se puede descartar más adelante.



1. Después de ponerse los guantes y limpiar los pezones, tire los primeros chorros de leche.



2. Desinfecte la punta del pezón con un algodón impregnado en alcohol.



3. Sostenga el tubo horizontal para evitar la contaminación a partir de estiércol o partículas de cama.

Si toma una muestra de los cuatro cuarterones, tome la misma cantidad de cada uno de ellos. No llene completamente el tubo



4. Bañe cada uno de los pezones con una solución desinfectante eficaz.



5. Con un rotulador permanente registre la muestra: Identificación de la vaca, cuarterón, fechas... Enfríe las muestras. Envíelas al laboratorio rápidamente. Si esto no es posible, congelar las muestras inmediatamente.